

Surgidry

HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL

O Surgidry nas apresentações de pó e esponja tem indicação em diferentes áreas cirúrgicas, podendo ser utilizados como agentes coadjuvantes no processo de hemostasia, principalmente naqueles casos onde o controle do sangramento, por ligadura ou por métodos convencionais (eletrocautério), é ineficaz ou impraticável.

O Surgidry deve ser utilizado em quantidade necessária para controlar a hemostasia, devendo ser colocado diretamente sobre a superfície sangrante, podendo ser

cortado do tamanho desejado. Manter a matriz no local pressionando-a ligeiramente, por algum tempo, até obter o efeito desejado. O tempo necessário de aplicação pode variar de acordo com a natureza e o volume do sangramento.

O Surgidry pode ser deixado no local, se necessário. Caso deseje retirá-lo, a irrigação com solução salina, antes de removê-lo, evitará o deslocamento do coágulo.



Produto

Matriz Orgânica de Colágeno Tipo I Polimerizado e Purificado Fibrilar

Purificação

O processo utilizado pela Technodry retira as proteínas não colagênicas dos tecidos.

Extraí a porção antigênica das fibras colágenas.

Não desconfigura a estrutura helicoidal tripla.

Mantém as características estruturais e atividades hemostáticas inerentes ao colágeno natural.

Biocompatibilidade

Testes de Biocompatibilidade (EN ISO 10993) tais como: citotoxicidade, toxicidade sistêmica aguda, toxicidade crônica, sensibilização dérmica e mutagenicidade, comprovam ser o produto biocompatível e atóxico.


Mecanismo de ação

O colágeno, em forma de esponja ou pó, apresenta inerente atividade hemostática que é dependente da preservação de sua estrutura fibrilar com moléculas de colágeno helicoidal intactas, associadas entre si em um arranjo quaternário.


Quando as plaquetas no sangue entram em contato com fibras colágenas, elas são ativadas, mudando de forma, agregando ao colágeno e liberando fatores de coagulação (degranulação).

Estes fatores plaquetários, juntamente com outros fatores de coagulação plasmática, iniciam a formação de coágulo de fibrina.

Uso do Surgidry hemostático esponja em cirurgia de histerectomia

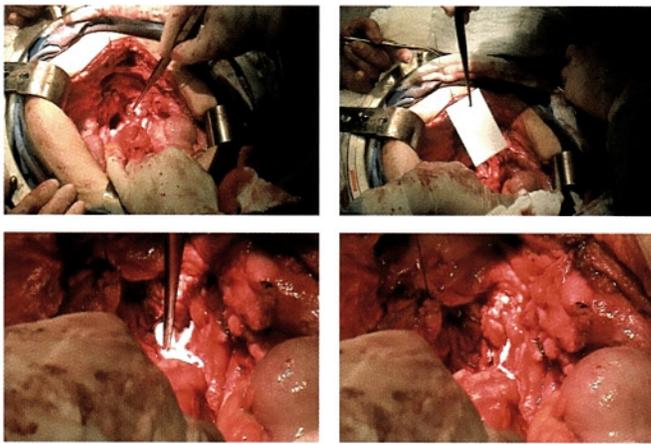

Uso do Surgidry hemostático pó em cirurgia ortopédica de coluna vertebral

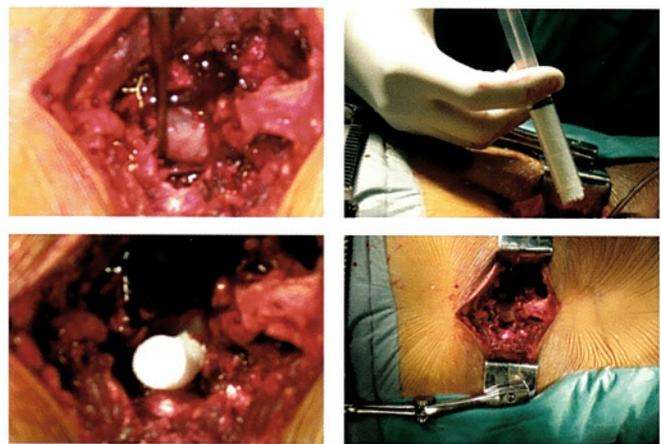

Uso do Surgidry hemostático esponja durante abordagem microcirúrgica de meningioma do seio cavernoso

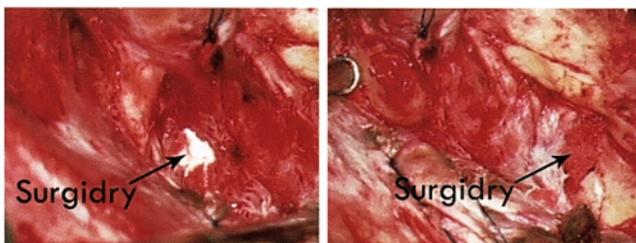


Tabela de tamanhos dos hemostáticos Surgidry esponjas - Fibrilar (caixa com 5 blisters cada)

Código	Tamanho	Código	Tamanho
SH01	1 x 1 x 0,2cm	SH16	7 x 20 x 0,2cm
SH02	2 x 1 x 0,2cm	SH17	7,5 x 7,5 x 0,2cm
SH03	2 x 2 x 0,2cm	SH18	8 x 12,5 x 0,2cm
SH04	2 x 3 x 0,2cm	SH19	10 x 10 x 0,2cm
SH05	2,5 x 4 x 0,2cm	SH20	10 x 12 x 0,2cm
SH06	2,5 x 8 x 0,2cm	SH21	10 x 20 x 0,2cm
SH07	3 x 5 x 0,2cm		
SH08	3,5 x 3,5 x 0,2cm		
SH09	4 x 4 x 0,2cm		
SH10	4,5 x 8 x 0,2cm		
SH11	4,5 x 7,5 x 0,2cm		
SH12	5 x 5 x 0,2cm		
SH13	5 x 7 x 0,2cm		
SH14	5 x 8 x 0,2cm		
SH15	5 x 10 x 0,2cm		

Surgidry em pó

Código	Tamanho
SH22	Seringa/ 5cc

Surgidry em cilindro

Código	Tamanho
SH23	2 x 0,4cm

ASSPRESS
CIRÚRGICA LTDA

E. Lecey

51 999 467 958
51 983 006 563

elecey@gmail.com

www.asspress.com.br



TECHNODRY

Biomateriais Absorvíveis

Av. José Cândido da Silveira, 2100 - sl. 12
Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31035-536

51 999 467 958
51 983 006 563

elecey@gmail.com